



Geachte collega's

Vanaf heden zullen er nieuwe anaërobe hemocultuurflessen in circulatie komen en stelselmatig de oude vervangen. Het medium in deze nieuwe flessen zorgt voor een betere neutralisatie van antibiotica en een snellere detectie van de meeste organismen. In plaats van een parse dop, hebben deze nieuwe flessen een oranje dop. De afnametechniek voor deze nieuwe flessen is volledig identiek. De oude flessen kunnen verder gebruikt worden zolang ze voorradig zijn.

Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op:

- **Bewaring:** de ongebruikte hemocultuurflessen dienen op kamertemperatuur en beschut tegen rechtstreeks zonlicht bewaard te worden.
- **Vulling:** alle flessen zijn uitgerust met een streep die de optimale vulling aangeeft (zie foto in bijlage). Gelieve de optimale vullingsgraad te respecteren. Overvulling kan aanleiding geven tot vals positieve flessen, ondervulling tot vals negatieve flessen.
- **Transport:** na afname dienen de flessen, samen met een aanvraagformulier, zo snel mogelijk naar het labo te worden gebracht of te worden opgestuurd via het buizentransport. De flessen mogen maximaal 4 uur op kamertemperatuur worden bewaard, nooit in de koelkast!

Zie <http://labogids.uza.be/Downloads/Hemoculturen.pdf> procedure hemoculturen

Voor meer inlichtingen of vragen in dit verband, aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Herman Goossens
Hilde Jansens
Veerle Matheussen
Erlangga Yusuf

Wil u ook onze andere
nieuwe berichten lezen, neem
dan een kijkje op
de **labogids**