



Beste collega's,

Vanaf woensdag 27 januari 2016 zal de *QuantiFERON-TB* bepaling of interferon-gamma release assay (IGRA) test van testkit wijzigen (*QuantiFERON-TB GOLD* (paarse testkits) wordt *QuantiFERON-TB GOLD PLUS* (blauwe testkits), zie bijlage voor foto beide testkits).

Het verschil met de huidige test is dat er in plaats van 3 tubes nu 4 tubes van 1 ml bloed moeten afgenomen worden, hetgeen moet resulteren in een verhoogde gevoeligheid van de test in specifieke patiëntenpopulaties (kinderen en immuun gecompromiteerden). De afname instructies blijven ongewijzigd. De tubes dienen 10 maal omgezwinkt te worden zodat het volledige binnenoppervlak van de tube met bloed gecoat is en vervolgens zo snel mogelijk naar het labo worden gebracht, zodat de incubatie bij 37°C kan starten.

Gelieve dus na het verstrijken van bovengenoemde datum geen (circulerende) oude testkits meer te gebruiken, want deze kunnen door ons niet meer geanalyseerd worden. U kan de oude terugbezorgen op het klinisch laboratorium. Nieuwe testkits kunnen opgehaald worden aan de centrale monsterreceptie van het klinisch laboratorium of op het laboratorium microbiologie.

Voor meer inlichtingen of vragen in dit verband, aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Labo Microbiologie

Herman Goossens

Greet leven

Hilde Jansens

Veerle Matheussen

Heleen Nailis

Wil u ook onze andere
nieuw sbrieven lezen, neem
dan een kijkje op
de **labogids**