



Onderwerp: gewijzigde afname Quantiferon

Geachte collega's,

Vanaf januari 2017 wordt de afname voor de *QuantiFERON*-TB bepaling of interferon-gamma release assay (IGRA) test aangepast en schakelen we over naar een Li-Heparine (groene dop) afname tube van 10 ml. In het labo zal het bloed dan over de 4 verschillende TB tubes verdeeld worden. Hierna wordt het staal gedurende 16 tot 24 uur geïncubeerd op 37°C gevolgd door centrifugatie en pas dan de eigenlijke analyse. De pre-analytische fase, die cruciaal is voor een correct resultaat, willen we op deze manier zo veel mogelijk standaardiseren.

Hiervoor is het belangrijk dat we 10 ml Li-Heparine bloed ontvangen en dat het staal direct naar het labo verstuurd wordt, DUS niet in de frigo bewaren maar onmiddellijk versturen. De analyse wordt niet in het weekend uitgevoerd, dus stalen moeten op weekdays (voor 15 uur op vrijdag) op het labo toekomen om alle volgende stappen correct te kunnen uitvoeren.

Voor meer inlichtingen of vragen in dit verband, aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Herman Goossens
Hilde Jansens
Veerle Matheussen
Erlangga Yusuf

Wil u ook onze andere
nieuw sbrieven lezen, neem
dan een kijkje op
de **labogids**