



Beste collega's

Vanaf maandag 12 juni schakelen we over van een zelfbereid virustransportmedium (VTM) naar een commercieel UTM virustransportmedium, voor het transport van stalen afgenomen op vegers voor viruskweek (bijvoorbeeld huidvegers voor herpes simplex virus kweek, conjunctivavegers voor adenovirus kweek, speeksel voor CMV kweek, keelvegers voor parainfluenzavirus kweek, ...). Het nieuwe UTM transportmedium met bijhorende wisser (flocked swab) zal verkrijgbaar zijn per stuk via scanmodule 2293605, en moet dus niet meer afgehaald worden op het labo. Via DOTS zal bij aanvraag van deze vegers voor viruskweek de boodschap 'specifiek transportmedium (virologisch) op het labo af te halen igv viruskweek' worden vervangen door 'UTM virustransportmedium beschikbaar per stuk via scanmodule 2293605 igv viruskweek'.

De diensten die in het verleden gebruik maakten van de zelfbereide virustransportmedia en dus nu de nieuwe UTM wissers beschikbaar willen hebben via de scanmodule, kunnen hiervoor contact opnemen met Eddy Mariën (intern transport/scan, tel: 4421), met vermelding van maximum voorraad, lokaalnummer en kast- en reknummer.

Let wel, deze UTM media gelijken sterk op de wissers die gebruikt worden voor bacteriologische kweek en PCR, de eSwabs (roze dop), maar zijn te herkennen aan de rode dop en UTM benaming op de verpakking. We zullen ze in de beginfase ook voorzien van een groene fluosticker met 'viruskweek' erop.

De zelfbereide virustransportmedia die nog in omloop zijn mogen gerust verder gebruikt worden, tot het verstrijken van de vervaldatum.

Voor meer inlichtingen of vragen in dit verband, aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Herman Goossens
Hilde Jansens

Wil u ook onze andere
nieuw sbrieven lezen, neem
dan een kijkje op
de **labogids**

Veerle Matheussen
Erlangga Yusuf